



Oxivir® TB

Desinfetante de nível intermediário

Finalidade de Uso

Oxivir TB é um limpador desinfetante para ambientes hospitalares formulado a base de peróxido de hidrogênio acelerado. **Oxivir TB** limpa e desinfeta em uma única etapa. Pode ser utilizado em diversas superfícies tais como: vinil, acrílico e outras superfícies plásticas, aço inox, alumínio, laminados, vidros, entre outros. **Oxivir TB** tem ação virucida, bactericida, fungicida e tuberculicida.

Características / Benefícios

- Ampla eficácia, comprovada por laudos microbiológicos de laboratórios reblados e/ou certificado EPA;
- Virucida. Eficaz frente a Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, Herpes Simplex Virus Type 1, Herpes Simplex Virus Type 2, HIV-1, Avian Influenza A (H3N2), Human Coronavirus, Influenza A/Hong Kong, Norovirus, Poliovirus Type 1, Rhinovirus Type 37, Rotavirus e SARS-CoV 2;
- Bactericida. Eficaz frente a *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella enterica*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Escherichia coli* (ESBL), *Acinetobacter baumannii*, *Staphylococcus aureus* MRSA, *Klebsiella pneumoniae* KPC, *Enterococcus faecalis* VRE, *Shigella dysenteriae* e *Enterobacter aerogenes*;
- Fungicida. Eficaz frente a *Candida albicans*, *Candida auris* e *Trichophyton mentagrophytes*;
- Tuberculicida. Eficaz frente a *Mycobacterium bovis*;
- Eficaz frente a esporos de *Clostridium difficile*;
- Único a possuir tecnologia AHP (peróxido de hidrogênio acelerado), patenteada **Diversey**;
- Alto poder de limpeza e alvejamento;
- Pronto uso. Dispensa diluição e facilita a aplicação;
- Tempo de ação a partir de 1 min de acordo com os laudos de eficácia;
- Apresenta todos os laudos com metodologia em presença de sujidade (3g/l de albumina e 3ml/L soro de cavalo), o que garante limpeza e desinfecção em uma única etapa;
- Não necessita de enxágue*;
- Seguro para o meio ambiente.

*Verificar procedimentos e modo de uso de cada aplicação.

Modo de Usar

Para desinfecção de nível intermediário: Lave, enxágue e deixe secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Deixando em contato com a solução por 10 minutos. Enxágue e deixe secar. Utilize-os o mais breve possível. **Para desinfecção frente Micobactérias e Esporos de *Clostridium difficile*:** Em casos de isolamentos (suspeita ou confirmação), umedecer bem os panos, tecidos não tecidos, fibras entre outros, friccione nas superfícies e deixe em contato por 10 minutos. **Para descontaminação de matéria orgânica:** Remova a matéria orgânica com papel absorvente (pequena quantidade) ou com uma pá (grande quantidade), limpe a superfície com o produto. Aplique novamente o produto e deixe em contato por 5 minutos. Deixe secar ao ar ou enxágue, se necessário. **Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em uma única etapa:** Aplique o produto através de spray, panos, tecidos não tecidos, fibras entre outros, friccione nas superfícies e deixe em contato por 5 minutos. Deixe secar ao ar. **Para desinfecção de artigos não críticos:** Limpe previamente o artigo, enxágue e seque. Aplique o produto através de spray, panos, tecidos não tecidos, fibras, entre outros, deixando em contato por 5 minutos. Enxágue os artigos com água potável e seque. Utilize-os o mais breve possível. Não utilizar em utensílios ou pratos.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
pH puro	2,5 – 3,5
Teor de Ativo %	0,50 – 0,55

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Peróxido de Hidrogênio (0,52%), Tensoativo Aniônico, Tensoativo Não Iônico, Solvente, Aditivo, Agente de Controle de pH, Acidificante, Alcalinizante e Água Deionizada.

Princípio Ativo

Peróxido de Hidrogênio – 0,52%

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0246

